


yuwell

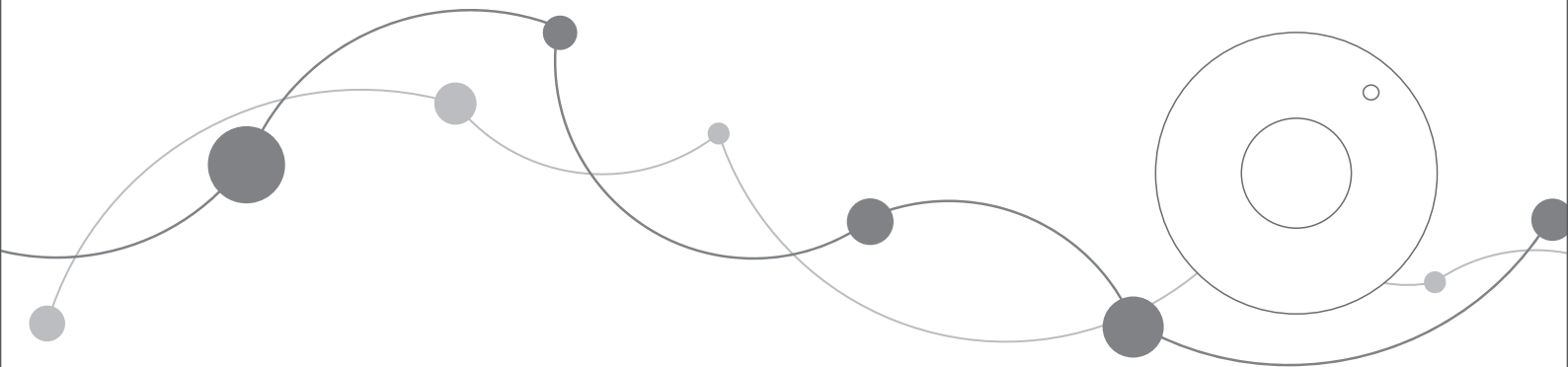

เบาะลมรุ่น กลม B

คู่มือการใช้งาน

โปรดอ่านคำแนะนำอย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์



JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO.,LTD.
Yunyang Industrial Park 212300 Danyang, Jiangsu
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
www.yuwell.com

Ver.00




คุณสมบัติ

- ▶ ใช้สำหรับป้องกันแผลกดทับ ของผู้ป่วยหลังผ่าตัด หรือผู้ป่วยติดเตียง

โครงสร้างของผลิตภัณฑ์

- ▶ รุ่น: กลม

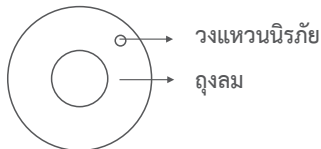

ข้อมูลทางเทคนิค

- ▶ เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ รุ่น กลม ผลิตจากวัสดุที่เคลือบด้วย PVC
- ▶ รองรับน้ำหนัก: 100 กก.
- ▶ ขนาดหลังถูกขยาย

เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก	เส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน	ความหนา
460 มม.	120 มม.	85 มม.

ข้อบ่งใช้

- ▶ ผลิตภัณฑ์นี้สามารถสูบลมได้ โดยใช้เครื่องสูบลม หรือวิธีอื่นๆ
- ▶ ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องวางกึ่งกลางเก้าอี้ และจำกัดผู้ใช้งานเพียงคนเดียว

วิธีการบำรุงรักษา และข้อควรระวัง

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
⚠	หากใช้งานไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือตัวบุคคลได้
ⓘ	ข้อควรปฏิบัติตาม
⊘	ข้อห้าม

- ⓘ ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กก. ไม่ควรใช้เบาะรุ่นกลม
- ⓘ ควรระวังเมื่อป้อนลม เพื่อป้องกันเบาะลมแตก
- ⊘ ห้ามวางสัมผัสนิ้วของมีคม เพื่อป้องกันการแตก และร้าวของผลิตภัณฑ์
- ⓘ ควรรักษาความสะอาดของผลิตภัณฑ์เสมอ สามารถใช้ผงซักฟอกที่เป็นกลางในการทำทำความสะอาดพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ได้
- ⚠ ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงสารกัดกร่อน และอัลคาไลน์
- ⓘ กรุณาเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก ห่าง หลีกเลี่ยงบริเวณชื้น
- ▶ การทำลายทิ้ง ควรได้รับการจัดการตามระเบียบ ข้อบังคับ ด้านความคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของรัฐสภา

บริษัทของสงวนสิทธิ์ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และรูปลักษณะของผลิตภัณฑ์