


yuwell

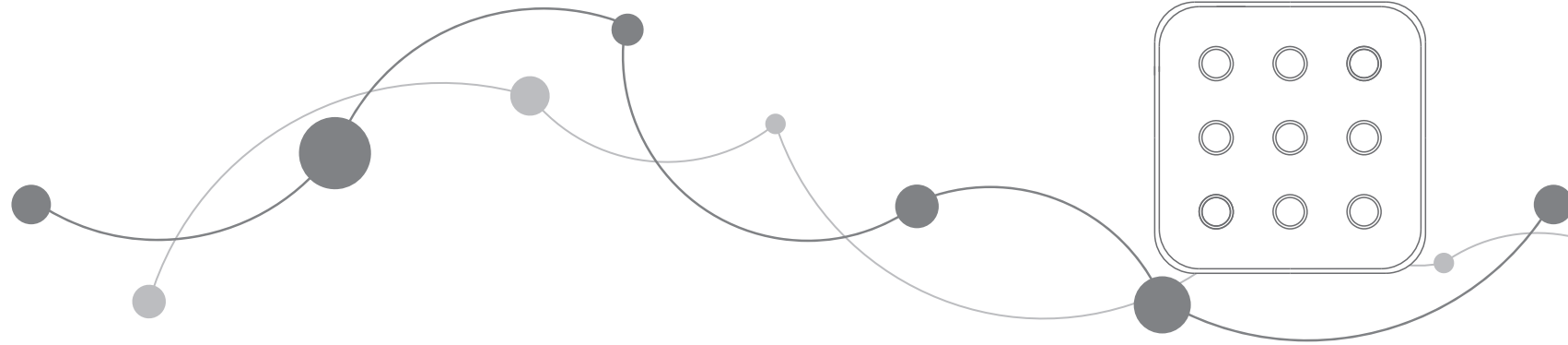

เบาะลมรุ่น กลม B/สี่เหลี่ยม B/หลัง A

คู่มือการใช้งาน

โปรดอ่านคำแนะนำอย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

หากมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์



JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO.,LTD.
Yunyang Industrial Park 212300 Danyang, Jiangsu
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
www.yuwell.com

Ver.00 

คุณสมบัติ

- ▶ ใช้สำหรับป้องกันแผลกดทับหรือบรรเทาความเมื่อยล้าของกัน หลัง และส่วนอื่นๆ ของผู้ป่วยหลังผ่าตัด หรือผู้ป่วยติดเตียง
- ▶ ไม่มีข้อห้ามในการใช้งาน

องค์ประกอบของสินค้า

- ▶ ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยเบาะลมและหัวเติมลม

ข้อมูลทางเทคนิค

- ▶ เบาะแบบกลมและสี่เหลี่ยม รับน้ำหนักได้สูงสุด: 100 กก.
- ▶ ขนาดหลังขยาย:

ประเภท	ขนาด(มม.)		
	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง
Round type B	460±10	120±10	85±5
	เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก	เส้นผ่าศูนย์กลาง ภายใน	
Square type B	440±10	440±10	85±5
Back type A	580±10	420±10	/

- ▶ สัญลักษณ์และความหมายของข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์นี้




	วางขึ้นตามแนวลูกศร		แตกได้		เก็บในที่แห้ง
---	--------------------	---	--------	---	---------------

ข้อบ่งใช้

- ▶ ผลิตภัณฑ์นี้สามารถสูบลมได้ โดยใช้เครื่องสูบลม หรือวิธีอื่นๆ
- ▶ ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องวางกึ่งกลางเก้าอี้ และจำกัดผู้ใช้งานเพียงคนเดียว

วิธีการบำรุงรักษา และข้อควรระวัง

- ▶ ตารางค่าเตือนและข้อควรระวัง สำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย

รูปภาพ	คำอธิบาย
	คำเตือน เป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ หากใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง
	ข้อบังคับ หรือสิ่งที่ต้องปฏิบัติตาม ศึกษาจากคู่มือ
	ข้อห้ามบางประการ ศึกษาจากคู่มือ

- ⊕ ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กก. ไม่ควรใช้เบาะรุ่นกลม และสี่เหลี่ยม
- ⊕ ควบคุมแรงดันให้เหมาะสม เพื่อป้องกันเบาะลมแตก
- ⊖ ห้ามวางสัมผัสนของมีคม เพื่อป้องกันการแตก และรั่วของผลิตภัณฑ์

- ⊕ ควรรักษาความสะอาดของผลิตภัณฑ์เสมอ สามารถใช้ผงซักฟอกที่เป็นกลางในการทำความสะอาดพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ได้

⚠ ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงสารกัดกร่อน และอัลคาไลน์

- ⊕ กรุณาเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก ห่าง หลีกเลี่ยงบริเวณชื้น
- ▶ การทำลายทิ้ง ควรได้รับการจัดการตามระเบียบ ข้อบังคับ ด้านความคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล
- ▶ อายุการใช้งาน: 1 ปี
- ▶ อ้างอิง: คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม, ใบรับรอง 1 ฉบับ

การบริการหลังการขาย

- ▶ โปรดตรวจสอบความแน่นของพื้นผิว และเบาะลมก่อนซื้อ ไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้า