

คู่มือการใช้งานเข็มเจาะเลือดแบบใช้แล้วทิ้ง(แบบอ่อน)

[ชื่อผลิตภัณฑ์] เข็มเจาะเลือดแบบใช้แล้วทิ้ง

[ประเภท] แบบอ่อน

[ข้อมูลจำเพาะ] 21G, 23G, 26G, 28G, 30G, 32G, 33G


[จุดประสงค์การใช้งาน] สำหรับเก็บตัวอย่างเลือดจากหลอดเลือดฝอย

[ข้อควรระวัง]

- เข็มเจาะเลือดได้รับการรับรองว่าปลอดภัยในขณะที่แผ่นป้องกันถูกปิดผนึกไว้กับฐาน
- ห้ามใช้หากที่ปิดผนึกได้รับความเสียหายหรือฉีกขาด
- อย่าเก็บเข็มเจาะเลือดไว้ในปากกาเก็บตัวอย่างเลือด
- โปรดเก็บผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากเด็ก
- เข็มเจาะเลือดเป็นแบบใช้แล้วทิ้งและห้ามใช้มากกว่าหนึ่งครั้งหรือใช้ร่วมกับผู้อื่น

[ข้อห้าม] ไม่มี

[วิธีการใช้งาน]

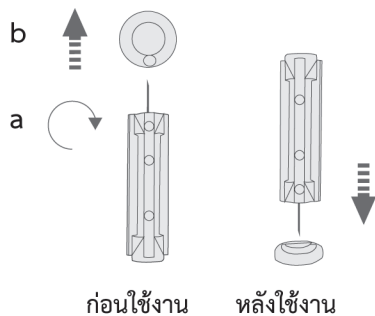

1. ใส่เข็มเจาะเลือดลงในปากกาเก็บตัวอย่างเลือดและปิดฝาป้องกัน
2. อ่านคู่มือการใช้งานเข็มเจาะเลือด
3. หลังจากใช้งานแล้ว โปรดทิ้งเข็มเจาะเลือดในถังขยะติดเชื้อ

[ความหมายสัญลักษณ์]

STERILE R

ทำให้ปราศจากเชื้อโดยการฉายรังสี



ห้ามใช้ซ้ำ

LOT

รหัสรอบผลิต



วันหมดอายุ



ผู้ผลิต

EC REP

ผู้แทนที่ได้รับอนุญาตในสหภาพยุโรป

CE 0197

เครื่องหมาย CE และเลข Notify body



ข้อควรระวัง

[NotifiedBody]

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Tillystraße 2, 90431, Nürnberg, Germany

[ผู้แทนที่ได้รับอนุญาตในสหภาพยุโรป]

EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20,2514 AP, The Hague, The Netherlands

[ผู้ผลิต]

SteriLance Medical (Suzhou) Inc.

No.168 PuTuoShan Road, New District, 215153 Suzhou, Jiangsu, P.R.China

[วันที่ทวนเอกสาร] 22 กันยายน 2019 (เวอร์ชัน 02)